

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK


Ukáže-li test negativní výsledek, může se testovaný dále účastnit výuky bez omezení.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK

Pokud test ukáže pozitivní výsledek, musí být testovaný neprodleně separován v jiné místnosti a veškeré plochy, části nábytku i věci, kterých se testovaný mohl dotýkat, musí být ihned ošetřeny dezinfekčními prostředky.

Antigenní rychlotest určený pro sebetestování.

Postup testování:

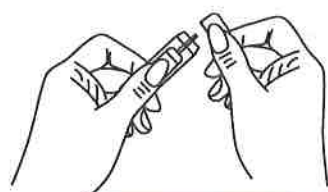


1

Otevřete lahvičku s roztokem otočením horního křídélka.




2

Nakapejte celý roztok do zkumavky

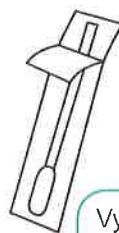


3

Vyjměte výtěrovou tyčinku z balení a nedotýkejte se její špičky!

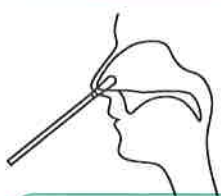


4

Vložte výtěrovou tyčinku do jedné nosní díry, 1-2 cm hluboko.

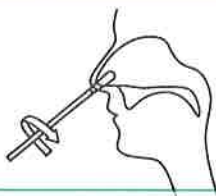


5

Otáčejte s výtěrovou tyčinkou v kruhovém pohybu okolo celé vnitřní strany nosní díry. Toto zopakujte 5x.

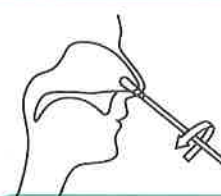

6

Opakujte stejný proces v druhé nosní dírcce použitím té samé výtěrové tyčinky.

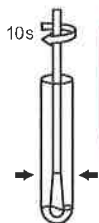

10s

Výtěrovou tyčinku vložte do zkumavky s roztokem a 10 vteřin s ní ve zkumavce otáčejte.

7

Zkumavku při vyndávání výtěrové tyčinky stlačte, aby z ní vyteklo co nejvíce tekutiny do zkumavky.

8




Na zkumavku nasadte špičku s kapátkem.

9



10

Otevřete sáček s testovací kazetou.

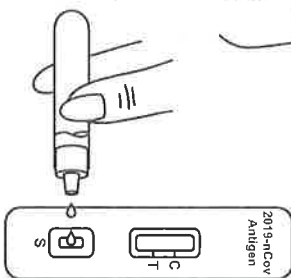

11


Ze zkumavky nakapejte 2 kapky roztoku do jamky testovací kazety.




12

Do 20 minut uvidíte výsledek testu.

Interpretace výsledku testu:

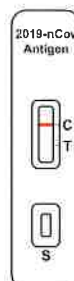

Negativní výsledek

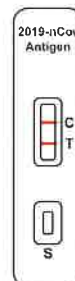

Pozitivní výsledek



Neplatný výsledek

